

## Description

Pâte anti-flux à base d'oxide de zirconium.

## Utilisation

Stopor sert à délimiter les zones à braser en prévenant l'étalement de la brasure. Convient à la préparation de tous les travaux de brasage en alliage céramo-métallique et conventionnel précieux. Est également indiqué pour la préparation de brasage d'attachements. Stopor peut être utiliser pour la brasage au four à céramique et ainsi avec la flamme.

## Mode d'emploi

Lors de la brasage au four à céramique d'éléments céramo-métalliques avec un ou plusieurs éléments en alliage conventionnel, recouvrir avec la pâte Stopor le maximum de la surface de chaque élément en alliage conventionnel sauf, les endroits à braser. Cette application de Stopor protège en effet durant la chauffe, les alliages conventionnels de l'oxidation et évite ainsi de transmettre des coloration dans la céramique.

Conditionnement  
08052181 Stopor Pot de 10g

Rx only